


Kullanım kılavuzu

Genie 2 ve Genie

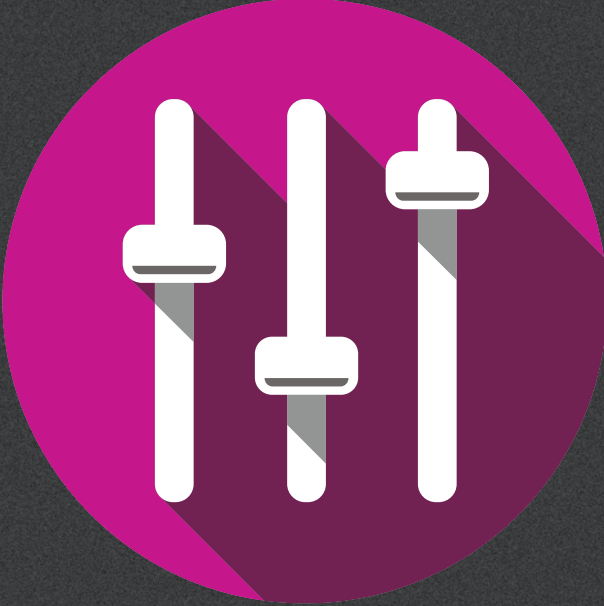

Giriş	3
Kullanım amacı	3
Kullanım ortamı	3
Hazırlık	4
Kurulum	4
Sistem gereksinimleri	4
Opsiyonel araçlar	4
Bağımsız Genie 2 veya Genie ve Veri tabanı	5
Genie 2'ye genel bakış	6
Tinnitus	15
Oticon RemoteCare	18
Genie'ye genel bakış	22
Uyarılar	32
Ürün simgelerinin tanımı	35

Bu kullanım kılavuzu Genie 2 | 2019.1 ve Genie | 2017.1 için geçerlidir.

Genie 2, Oticon Opn, Oticon Opn S, Oticon Opn Play ve Oticon Siya işitme cihazı aile ve modelleri için kullanılan bir uygulama yazılımıdır.

Genie diğer tüm Oticon işitme cihazı aile ve modelleri için kullanılan bir uygulama yazılımıdır.

Bu IFU'nun basılı sürümü bölge distribütörü tarafından temin edilebilir.

Kullanım amacı

Bu uygulama yazılımı, işitme çözümlerini uygulamak ve güncellemek için tasarlanmıştır.

Bu uygulama yazılımı, gerçek kulak ölçüm ekipmanına erişimi kolaylaştırabilir.

Tinnitus SoundSupport'un kullanım amacı

Tinnitus SoundSupport, tinnitus yönetim programının bir birimi olarak, tinnitus sıkıntısı yaşayan hastalara geçici bir rahatlama sağlamak amacıyla ses oluşturmak için kullanılan bir araçtır.

Tinnitus SoundSupport 18 yaş altı kişilere yönelik değildir.

Tinnitus SoundSupport tinnitus ve işitme kayıpların değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda hakim olan lisanslı işitme uzmanlarına (odyologlar, odyometristler, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un uygulanması, tinnitus yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kullanım ortamı

İşitme Uzmanları tarafından klinik bir ortamda kullanılır.

Kurulum

Yazılım kurulumu Genie 2 ve Genie'yi kuracaktır. Eğer Genie 2 ve/veya Genie'nin daha önceki sürümleri kurulu ise, bunlar otomatik olarak güncellenecek ve hasta oturumu Genie 2 ve Genie de görünecektir.

Genie 2 DVD'sini/USB'sini sürücüyü/giriş yerine taktığınızda kurulum programı otomatik olarak başlar. Başlamazsa Windows Explorer'ı açın, sürücüyü gidin ve "Setup.exe" dosyasını çift tıklayın.

Ekrandaki talimatları izleyin.

Sistem gereksinimleri

Genie 2'yi ve Genie'yi kurma ve kullanmayla ilgili sistem gereksinimleri aşağıda sıralanmıştır:

Donanım gereksinimleri

- CPU: Intel Core i5, 4 çekirdek, 2 GHz veya daha hızlı
- 4 GB RAM veya daha yüksek
- Sabit diskte 8 GB boş alan
- Ekran çözünürlüğü: minimum 1280 x 1024 piksel
- DVD kurulumu için DVD sürücüsü
- USB kurulumu ve programlama aygıtı için USB 2.0 girişi
- Klavye ve mouse
- Stereo veya 5.1 surround ses kartı (önerilen)

İşletim Sistemi gereksinimleri

- Windows 7 SP1 (32/64 bit)
- Windows 8 (RT dışındaki tüm sürümler)
- Windows 10 (32/64 bit)

Opsiyonel araçlar

- NOAH 4 (Genie 2 veya Genie bağımsız mod çalıştırılmıyorsa)*
- Oticon web sayfalarına erişim için bir tarayıcı
- PDF belgelerini okumak için bir PDF okuyucusu
- Sisteminizi virüs koruma yazılımı kurarak korumanızı öneririz

Bağımsız Genie 2 veya Genie ve Veritabanı

Genie 2 veya Genie NOAH'sız çalışıyorsa, ör. Bağımsız modda, Hasta modülü otomatik olarak kurulur. İlave bir Hasta düzenleyici adımı belirir.

Hasta modülünde hasta adı, doğum tarihi ve adres ile odyogram gibi demografik verileri girebilirsiniz. Hasta verileri, otomatik olarak Genie 2 ve Genie veri tabanına kaydedilir ve devamındaki uygulamalar için kullanılır.

Genie 2'yi veya Genie'yi bağımsız modda başlatmak için, Windows Başlat düğmesini, Programları, Oticon klasörünü ve sonra da Genie 2'yi veya Genie'yi tıklayın.

* NOAH 2 veya 3 sisteminde Genie 2 veya Genie kurulumu yapmayın. Yoksa NOAH 2 veya 3 veri tabanındaki Oticon uygulama verilerinize daha sonra erişemezsiniz.

Genie 2'ye genel bakış

Bu, Genie 2'deki işlemlere, temel özelliklere ve araçlara genel bir bakıştır. Bunu, Genie 2 uygulamasında kullanılan tipik adımlar ve araçlar hakkında bilgi edinmek için kullanabilirsiniz.


Genie 2 Düzenleyici Adımlar - yatay navigasyon



1. Hasta: Sadece Genie 2, NOAH dışında çalıştırıldığında görünür
2. Rehberlik: Sadece Oticon Rehberlik Araçları kurulduysa görünür
3. Aile: Seç, simüle et veya bağlan
4. Model seçimi: İşitme cihazı model ve özelliklerin seçimi
5. Uygulama: Kazanç ve ayarların, doğrulanması ve ince ayarı
6. Çıkış: Kullanıcı işlemleri düğmelerini, göstergelerini ve aksesuarlarını kur ve doğru. Kaydet, programla ve çık.

Görev Panosu - dikey navigasyon

Her düzenleyici adımımda, ekranın sol tarafında bir görev panosu bulunur. Görev panosu, uygulama sürecinde bulunduğunuz yerle ilgili araçlara ve bağlantılara erişmenizi sağlar.

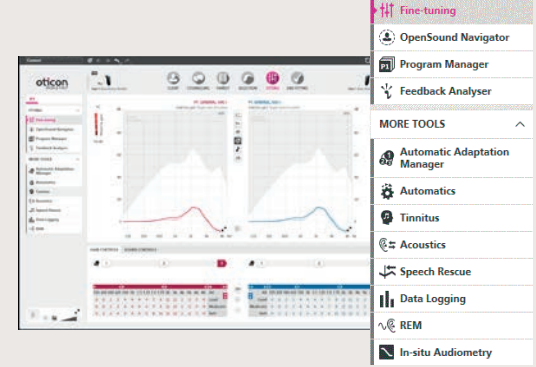

Genie 2'ye genel bakış

Aile adımı

NOAH içinden veya Genie 2 bağımsız yazılımındaki HASTA adımımdan hastanınızı seçtikten sonra, AİLE adımına gireceksiniz. Bu adımda aşağıdakilerden birini seçin:



1. **İşitme cihazlarına bağlan:**
FittingLINK 3.0 veya Noahlink Wireless ile cihazları bulmak için işitme cihazların pil yuvalarını açın, kapatın ve Bağlan düğmesine tıklayın veya işitme cihazlarını kablo ile bağlayın ve Bağlan düğmesine tıklayın. Bir sonraki oturumda cihazın ayarları ile devam etmeyi, yeni bir uygulama yapmayı veya farklı işitme cihazlarına bağlanıldığında ayarları aktarmayı seçebilirsiniz.
2. **Bağlantıyı simüle et:**
İşitme cihazların bağlantısını simüle etmek için Simüle et düğmesine tıklayın.


Genie 2 de Ayarları Aktar

Bu araç, bir uygulama oturumundan yeni bir işitme cihazları seçimine ayarların (MPO, manuel Adaptasyon yönetimi, Hafif ses algısı, Netlik algısı, bölgesel kontrol ve göstergelerin uygulandığı gibi) aktarılmasına izin verir. Bu araç, mevcut oturumdan farklı yeni işitme cihazları bağlandığında veya seçildiğinde otomatik olarak çalışır veya Araçlar menüsünden açılır.

Ayarları Aktar'ın nasıl kullanıldığı ile ilgili detaylar için lütfen yardım dosyalarına bakın.

Model Seçimi adımı

Bu adımda, aşağıda gösterilen opsiyonları seçerek tercihlerinizi belirlersiniz.

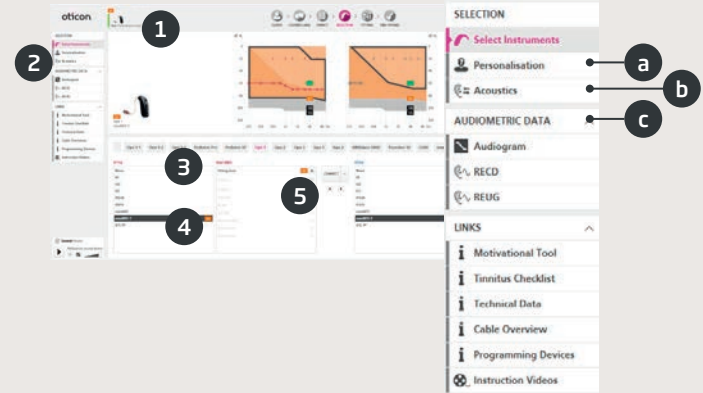


1. Durum alanı: Seçilen model, güç seviyesi, akustik ve bağlantı durumunun görüntüsü
2. Görev Panosundaki araçlar (opsiyonel) ör:
 - a. Kişiselleştirme: Hastanıza özel dinleme ihtiyaçları için uygulamayı özelleştirin. Oticon, ilk uygulama oturumunda bunu kullanmanızı önerir.
 - b. Akustik Parametreler: Kulağın akustik bağlantısını seçin. Ör: Kulaklık, hortum ve havalandırma deliği
 - c. Odyometrik Veriler: Doğru kazancı sağlamak için, odyometrik parametreleri doğrulayın ve güncelleyin. Bu özellikle bebekler ve küçük çocuklardaki işitme cihazı uygulamalarında önemlidir.
3. İşitme cihazı ailesi seçimi
4. İşitme cihazı model seçimi
5. Hoparlör güç seviyesi seçimi

Genie 2'ye genel bakış

I Uygulama adımı

Kazanç ve OpenSound Navigator™ varsayılan değerleri Kişiselleştirme adımında verilen yanıtlara dayanır, fakat Uygulama adımında onlar değiştirilebilir veya doğrulanabilir. Eğer kazanç ayarı gerekirse, bireysel frekans bantlarında ince ayar yapmadan önce Adaptasyon Yöneticisini kullanmayı düşünün.

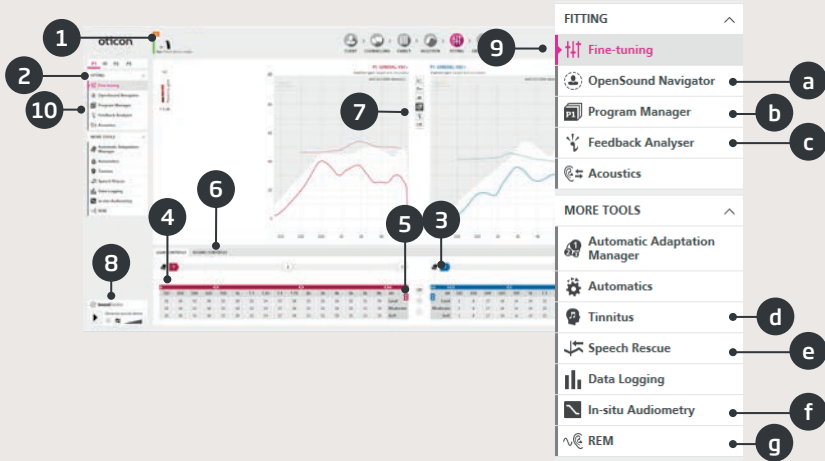


1. Bağlantı çubuğu: İşitme cihazların bağlantı durumu
 - Gri: Bağlantı yok
 - Yeşil: Bağlı ve ayarlar işitme cihazlarına programlanmış ve kayıt edilmiş
2. Etkin programı seçin ve programları P1'e bağlayın
3. Adaptasyon Yöneticisini ayarlayın. Belirlenen kazanç üç adımda geçiş
4. Bu ok uygulama bantlarının sayısını artırır
5. Bu ok MPO kontrollerine erişim sağlar

6. Ses kontrolleri:
 - Netlik Algılama trimeri: Sesin netliğini değiştirir (sadece öngörülen VAC+ rasyoneli için)
 - Hafif Ses Algılama trimeri: Hafif seslerin işitilebilirliğini değiştirir (sadece öngörülen VAC+ rasyoneli için)
7. Grafikler ve grafik görüntüleri:
 - Eğri tipi
 - Sinyal tipi
 - Girdi seviyeleri
 - Hedef görüntüsü
 - Tahmini feedback payı
 - Sıkıştırma oranları
8. Oticon SoundStudio: Hasta uygulamasının başarılı olmasını sağlamaya yardımcı olacak farklı ses ortamlarının sunumu
9. Pediatrik panel: Sadece pediatrik uygulama modunda mevcuttur, 18 yaşından küçük çocuklar için geçerlidir
10. Görev Panosundaki araçlar (opsiyonel)ör:.
 - a. OpenSound Navigator™: Oticon Opn, Oticon Opn S ve Oticon Opn Play işitme cihazların basit ve karmaşık dinleme ortamlarında nasıl çalışacağını ayarlayın (ilgili bölüme bakın)
 - Gürültüde Destek: Oticon Siya işitme cihazlarında gürültü azaltma ve direksiyonalliteyi ayarlayın
 - b. Program Yöneticisi: Programları ekleyin ve adlandırın, Oto Telefon programını etkinleştirin ve belirlenen rasyoneli seçin
 - c. Feedback Analizörü: Feedback riskini analiz edin (ilgili bölüme bakın)
 - d. Tinnitus: Tinnitus SoundSupport™'u etkinleştir ve ayarla (ilgili bölüme bakın)
 - e. Speech Rescue™ LX: Frekans alçaltmayı etkinleştir ve ayarla
 - f. In-situ Odyometre: İşitme cihazlarını ses dönüştürücüleri olarak kullanarak, hastanın işitmesini ölçün (ilgili bölüme bakın)
 - g. REM: REM AutoFit'i çalıştırmanızı veya işitme cihazlarını, Gerçek Kulak Ölçümü ekipmanınızla kullanmak için ölçüm moduna ayarlamanızı sağlar

OpenSound Navigator™ Aracı

Bu araç hastanız için belirlenen ayarları doğrulayabilir veya değiştirebilir. Belirlenen ayarlar  işareti ile gösterilir. Bu araç özellikle hastanın işitme cihazlarının basit ve karmaşık ortamlarda nasıl çalışacağını ayarlamak için kullanılır.

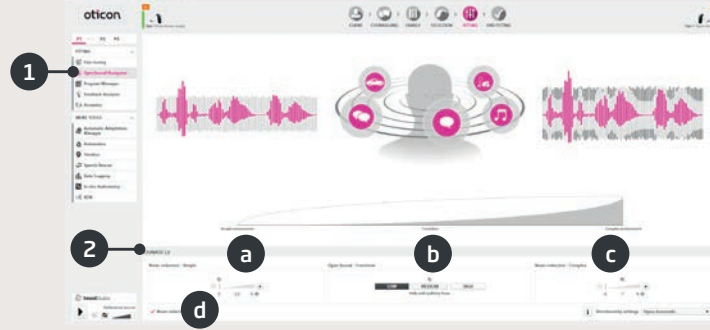

1. OpenSound Navigator™ yanıtı: Basit ve karmaşık ortamlarda direksiyonalite ve gürültü azaltma ayarlarına ilişkin YouMatic™ LX altında yapılan değişikliklerin grafiksel görünümüdür
2. YouMatic LX:
 - a. Gürültü azaltma – Basit: Basit dinleme ortamları için gürültü azaltma ayarları
 - b. Open Sound - Geçiş: Gürültülü ortamlarda konuşmalara odaklanmak için hastanızın ihtiyacı olan yardım seviyesini (Düşük, Orta, Yüksek veya Çok Yüksek) olarak ayarlayın. Onun tam üzerindeki Geçiş Paneli, hastanıza hangi yardım seviyesinin uygulandığını size grafikte göstererek seçimlerinizi yansıtır. Alternatif olarak, adaptif olmayan bir direksiyonalite, Pinna Omni veya Tam Direksiyonalite seçeneğini seçebilirsiniz
 - c. Gürültü azaltma – Karmaşık: Karmaşık ortamlar için gürültü azaltma ayarları
 - d. Gürültü Azaltma: Gürültü azaltmayı devre dışı bırakır

Genie 2'ye genel bakış

Feedback Analizörü Aracı

Yeni uygulamalarda ve uygulama parametreleri her değiştirildiğinde feedback analizi yapılması önerilir.



1. Başlat: Seçilen işitme cihazı ve kulağın akustik bağlantısıyla feedback analizini çalıştırın
2. Sil: Analiz edilen feedback payını silin
3. Arka plan Gürültü Seviyesi: Odadaki gürültü seviyesini gösterir ve geçerli feedback analizi için ortam çok gürültülü olduğunda bunu görmeye izin verir

Tinnitus



1. Tinnitus SoundSupport açık/kapalı: Tinnitus SoundSupport'u etkinleştir veya devre dışı bırak
2. Çift taraflı bağlantı: Varsayılan olarak kapalıdır
3. Tinnitus rahatlatıcı ses seçimi: Dört Geniş bantlı Ses ve üç Tabiat Sesi. Varsayılan "Yapılandırılmış" (odyograma göre)
4. Sinyal Seviyesi: Bir veya iki kulağı ayarlayın. Başlangıç seviyesi hastanın odyogramına dayanır
5. Modülasyon: Geniş bantlı sesler dört modülasyondan şekinden biri eklenerek kişiselleştirilebilir: Heyecanlı, Canlı, Hafif ve Dingin
6. Trimer tablosu: Geniş bantlı Sesler 16 frekans bandında şekillenebilir
7. Otomatik Seviye Kontrolü: Aç/kapa seçeneği. Ortam sesleri daha yüksek olduğunda tinnitus rahatlatıcı seslerini otomatik olarak düşürür
8. İşitme Cihazı Mikrofonu: İşitme cihazı mikrofonunu kapatmak için aç/kapa seçeneği.
9. Maks kullanım: Tinnitus rahatlatıcı ses seviyeleri kalıcı bir işitme hasarına yol açacak bir seviyeye geldiğinde Maks kullanım süresi göstergesi belirir ve böyle bir duruma maruz kalma sınırlandırılmalıdır.

Genie 2'ye genel bakış

In-situ Odyometre Aracı


In-Situ Odyometre, işitme cihazlarını ses dönüştürücüleri olarak kullanarak, hastanın işitmesini ölçmenizi sağlar. Bu da sonuçların cihaza ve akustik özelliklere özel olacağı anlamına gelir.



1. Ton türü
2. Hasta ile konuşma
3. Sesi çal
4. Odyogram kullanımı

Çıkış Adımı

Çıkış adımı, uygulama sürecindeki son adımdır. Buradan, uygun programları, rasyonelleri ve ayarları doğrulayabilirsiniz. Aşağıdaki uygulamayı bitirme özellikleri de mevcuttur.

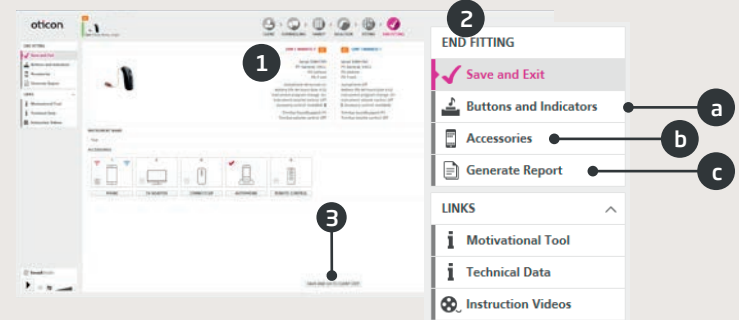

1. İşitme cihazının son ayarlarına ve işlevselliğine genel bakış
2. Çıkıştaki Görev Panosunu aşağıdakiler için kullanın:
 - a. Düğmeleri ve Göstergeleri Tanımlamak: Düğme kullanımı, ses kontrolü, bip ayarı ve LED modelleri
 - b. Aksesuarları Yönetmek: Eşleştirilmiş: Akıllı telefon, ConnectClip ve TV adaptörün ses seviyesini ve dengesini ayarların. Aynı zamanda, oto telefon ve DAI/FM programlarını yönetin
 - c. Raporları Yönetmek: Sizin ihtiyaçlarınıza ve hastanızın ihtiyaçlarına göre rapor seçimlerinizi yazdırmak, kaydetmek veya e-posta ile göndermek
 - d. Şarj edilebilir piller: Sadece miniRITE R'e bağlandığında gösterilir. Mevcut pil seviyesini, pil ömrünü ve pilin nasıl değiştirileceğini gösterir
3. Kaydet ve Çık/ Kaydet ve Hasta Adımına Git: Hastanızın işitme cihazına son ayarları ve ayarlamaları kaydeder ve programlar. Ayrıca ayarlar ve ayarlamalar sürekli olarak uygulama sürecinde kaydedilir, böylece önemli verileri kaybetmeden işitme cihazlarıyla bağlantıyı kesmek her zaman güvenli olur.

Genie 2'ye genel bakış

İ Oticon RemoteCare

Oticon RemoteCare™ hastanızla iletişim kurmanızı ve hastanızın işitme cihazlarına uzaktan gerçek zamanlı ayarlamalar yapmanızı sağlar. Değişikliklerinizi uzaktan güncelleyemiyorsanız, fiziki bir ziyaret gerekir. Oticon RemoteCare'de mevcut olmayan uygulama araçları için Genie 2 yardım dosyasına göz atın.

İlave sistem gereksinimleri

- PC kamerası VEYA harici kamera
- Mikrofon ve hoparlör VEYA kulaklık seti
- Email hesabı
- İstikrarlı bir internet bağlantısı: önerilen minimum hız 1/1 Mbit/s (sağlayıcınızla kontrol edin)

Hasta sistem gereksinimleri

Oticon Opn (FW6.0), Oticon Opn S, Oticon Opn Play veya Oticon Siya işitme cihazları - iPhone'nunuza eşleştirilmiş

- Bir iPhone. Uyumlu modeller için bakın: www.oticon.global/hearing-aid-users/support/faq/compatibility
- Güncel iPhone yazılımı: iOS 11.0 veya daha güncel. (Hangi iOS sürümüne sahip olduğunuzu görmek için: Ayarlar, Genel, Hakkında, Sürüm)
- İstikrarlı bir internet bağlantısı: önerilen minimum hız 1/1 Mbit/s (sağlayıcınızla kontrol edin)
- Bir e-mail hesabı
- Bir Apple-id hesabı

ÖNEMLİ UYARI

İşitme uzmanı, Oticon RemoteCare'i hastalarla kullanmak için gereken lisansı elde etmekle kendisi sorumludur. Oticon bu konuda herhangi bir sorumluluk almaz.

İ Oticon RemoteCare'i etkinleştir


Hesap oluşturun

Yerel temsilciniz tarafından gönderilen Oticon RemoteCare davet mailini açın ve talimatları takip edin.

Genie 2'de Oticon RemoteCare'i etkinleştir

Sırasıyla Tercihler, Tercihleri Düzenle, Yazılımı özelleştir bölümü, RemoteCare sekmesine gidin. RemoteCare'i Aç'ı seçin.

İ Oticon RemoteCare uygulaması

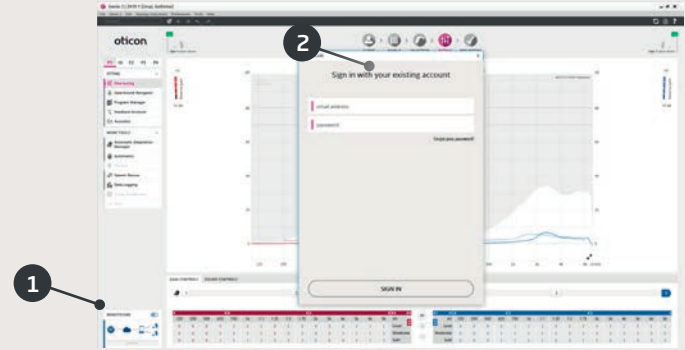


1. RemoteCare'i açma anahtarı

2. Oturum açın


3. Hasta hesap detaylarını girin ve 'Devam et'e basın

4. Hastayla iletişim kurmak için Randevu başlat düğmesine tıklayın

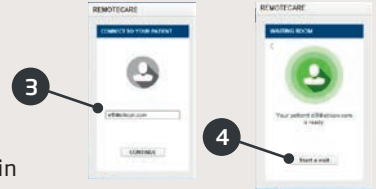

Not: Randevu başlatmak yalnızca, hasta orada bulunuyorsa/randevu başlatmışsa mümkündür

Genie 2'ye genel bakış

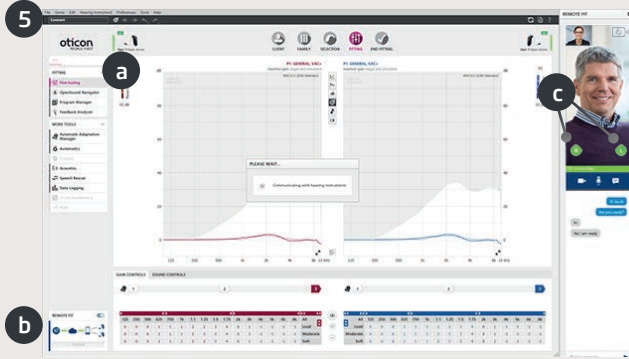

5. Hastanın işitme cihaz(lar)ını algılamak ve bağlanmak için Bağlan'a tıklayın. İşitme cihazları bağlandığında durum göstergeleri yeşil olur

İşitme cihazlarının bağlantı durumu üç yerde gösterilir:

- a) Bağlantı Çubuğu
- b) RemoteCare bağlantısına genel bakış
- c) RemoteCare iletişimcisi



RemoteCare iletişimcisi (A)

- a) Ses ve video yoluyla sizin ve hastanız arasında mesajlaşmayı ve iletişimi mümkün kılar
- b) İşitme cihazı durum göstergeleri
- c) Kameraya izin ver/izin verme
- d) Mikrofonu sessize al/sessize alma

- 6. Gerekirse işitme cihazlarını normalde yaptığınız gibi uygulayın
- 7. İşitme cihaz(lar)ınıza yeni ayarlamaları yüklemek için Yükle'ye tıklayın.
- 8. Bağlantıyı kes'e tıklayın. İşitme cihaz(lar)ınızın Genie 2 ile bağlantısı kesilecektir ve yeniden başlatılacaktır

Not: Aynı zamanda, işitme cihazların Uygulamayı Bitir ekranıyla da bağlantısını kesebilirsiniz

- 9. Çıkış adımına gidin, kaydetmek ve hastayla oturumu sonlandırmak için Kaydet ve çık/Kaydet ve hasta adınıza git'e tıklayın

Genie'ye genel bakış


Bu, Genie'deki işlevlerin, temel özelliklerin ve araçların bir genel görünümüdür. Genie uygulamasında kullanılan tipik adımlar ve araçlar hakkında bilgi edinmek için kullanabilirsiniz

Aile adımı



1. İşitme cihazını takın ve TARA'yı tıklayın
VEYA
2. Simüle etmek için cihaz ailelerine ait düğmelerden birini seçin

Düzenleyici Adımlar - Yatay Navigasyon

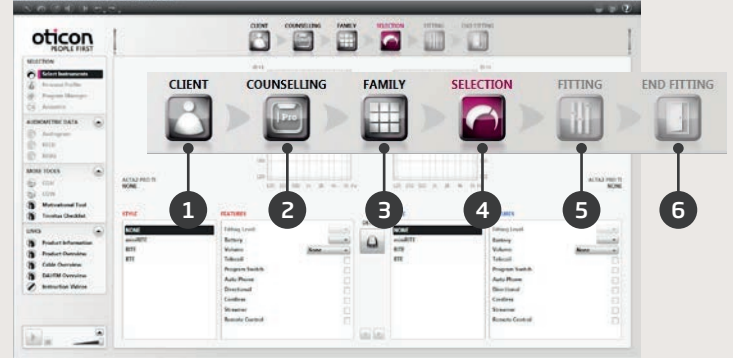

1. Hasta: Sadece NOAH haricinde Genie'yi çalıştırırken görünür
2. Rehberlik: Sadece eCaps kuruluşu görünür
3. Cihaz Seçimi: Tüm işitme cihazı ailelerinin seçimi
4. Model Seçimi: Cihaz modeli ve özelliklerini seçme
5. Uygulama: Ayarların doğrulanması ve hassas ayarı
6. Son: Kullanıcı işlemleri düğmelerini doğrulayın ve kullanın.
Kaydet, Programla ve Çık

Genie'ye genel bakış

Görev Panosu - Dikey Navigasyon



Her Düzenleyici adımında, uygulama işleminde olduğunuz yerle ilgili, size araç ve bağlantılara erişim sunan bir Görev Panosu vardır.

Model seçimi adımı



1. Durum alanında cihaz modeli ve belirlenen venti görüntülenir
2. Görev Bölmesinde opsiyonel araçlar:
 - a. Kişisel Bilgiler
 - b. Program Yöneticisi
 - c. Akustik Parametreler

I Uygulama adımı

Tanımlı ayarı, program içerisinde var olan çeşitli ses ortamı örneklerini kullanarak doğrulayın. Ayarlama yapılması gerekiyorsa, bireysel kontrolleri ayarlamadan önce Adaptasyon Yöneticisini kullanmayı düşünün.



1. Bağlantı Çubuğu, cihazın bağlantı durumunu gösterir:
 - Bağlı değil (gri)
 - Bağlı (sarı) gösterir.
 - Bağlı ve ayarlar programlanıp cihaza kaydedilmiş (yeşil)
2. Adaptasyon Yöneticisini ayarlar. Belirlenen kazanca üç adımda geçiş sağlar.
3. Hafif seslerin ayrıntılı ve rahat duyulma seviyelerini ayarlar
4. Bu oklar kullanılarak daha fazla kontrole erişilebilir
5. Bu oklar MPO kontrollerine erişim sağlar
6. Uygulama sırasında cihazları programlamak için Cihazı Programla düğmesine tıklayın
7. Etkin programı seçin ve programları P1'e bağlayın
8. Görev Bölmesindeki Araçlar (opsiyonel) ör.
 - Otomatik Fonksiyon Yöneticisi (SizMatik ve Otomatik Kontroller)
 - Program Yöneticisi (sonraki sayfaya bakın)
 - Feedback Yöneticisi
 - Speech Rescue™ (Dynamo ve Sensei SP işitme cihazlarında frekans alçaltma mevcuttur)
 - Tinnitus (Tinnitus Uygulama Kılavuzuna bakın)
 - Sunumun Kullanılması
 - Hafıza (ve Yaşam Boyu Öğrenme)
 - Uygulama Asistanı (sonraki sayfaya bakın)

Program Yöneticisi

Bu aracı, programların içeriğine ekleme yapmak veya içeriği değiştirmek için kullanın



1. Yeni bir program ekleyin
2. Programın içeriğini seçin
3. Oto Telefonu etkinleştirin
4. Programların sırasını değiştirin
5. Değiştirmek istediğiniz programı (P1, P2...) seçin
6. Uygulama görünümüne geri dönmek için Görev Bölmesindeki Kontrolleri seçin

Uygulama Asistanı

En sık karşılaşılan kullanıcı şikayetlerinin üstesinden gelebilmek için hassasayar aracı.



1. Bir sekme seçin: Genel Algılama, Konuşmayı Algılama veya Kendi Sesi
2. İstediğiniz sonuç için bir kontrol ve yön seçin (sol veya sağ - başlangıç ayarı ortadadır)
3. İmleri istenilen adımın üzerinde tuttuğunuz zaman, size öneride bulunacak bir ipucu aracı, ekranda belirir
4. Yapılan ayarı doğrulamak için ses ortam düğmelerini kullanın
5. Uygulama ekranına geri dönmek için, Görev Bölmesinden Ayarları seçin

Genie'ye genel bakış

Uygulamayı Sonlandırma adımı



1. Streameri cihazlara bağlayın:
 - Uygulama Bağlantısı: Seri no OKU'ya tıklayın veya Streamer seri numarasını girin
 - NOAH bağlantısı: Seri no OKU'ya tıklayın veya Streamer seri numarasını girin
 - HI-PRO: Streamer seri numarasını girin
2. Uygulamayı Bitir Görev Bölmesini şunun için kullanın;
 - a. Düğme kullanımı tanımlayın ve VC özelliğini etkinleştirin
 - b. Telefon programlarını tanımlayın ve Oto Telefon seçeneklerini etkinleştirin
 - c. Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Talimatlarını açın ve yazdırın
3. Kaydet, Programlama ve Çık'a tıklayın

⚠ Uyarılar

Olası hasta yaralanmaları veya işitme cihazı arızalarından kaçınmak için uygulama yazılımını kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarılara ve bu kitapçığın tüm içeriğine aşina olmalısınız.

İ Genel Güvenlik Önlemleri

Güvenlik gereği, uygulama yazılımının Kullanım Amacını, Tinnitus SoundSupport'un uygulama seviyelerine bağlı riskleri ve önerilen kullanım sürelerini mutlaka okuyun.

İ Bağlantı

İşitme cihazı ile kablolu ve kablosuz bağlantıyı kaybetmemeye veya iletişim hatalarının uygulama akışını bölmemesine dikkat edin.

İ Boğulma Tehlikeleri

Güvenlik gereği, 36 aylıktan daha küçük çocuklara takılırken dikkatli olunmalıdır. 36 aylıktan küçük çocukların her zaman kurcalanmaya karşı dayanıklı bir pil yuvası kullanması gerekir.

Güvenlik gereği, 36 aylıktan daha küçük çocuklara takılırken her zaman kulak kalıbı kullanın.

İ Aygıt yazılımı

Güvenlik gereği, güncellenmiş işitme cihazı, güncellemeden sonra fabrika ayarlarına döneceğinden, aygıt yazılımı güncellemesi sırasında hastanın işitme cihazını takmadığından mutlaka emin olun. Ayrıca, kullanıcı ayarlarını yeniden kurmadan işitme cihazını hastaya vermeyin.

Bağlı olan işitme cihazın seri numarasının, ilgili hasta için olan ofis otomasyon sistemindeki seri numarayla eşleştikten emin olun.

Aygıt yazılımı güncellemesinden önce ve sonra işitme cihazın aygıt yazılımı versiyonunu mutlaka not alın.

Programlama aygıtının yazılım versiyonu uygulama yazılımındaki aygıt yazılımı versiyonuyla uyumlu olduğundan emin olun.

Aygıt yazılımı güncellemesi sırasında, işitme cihazındaki veya bağlantı aygıtındaki bağlantı kopukluklarından veya arızalarından kaçının.

İ REM Sistemi

REM sistemine gönderilen yanlış veya beklenmeyen verilerin neden olduğu, REM sisteminden gelen herhangi bir hata mesajına dikkat edin.

İ Tinnitus

Güvenlik gereği, güvenli dinleme seviyelerini sağlamak için Tinnitus SoundSupport kullanım sınırlamaları hakkında hastayı mutlaka uyarın.

Tinnitus SoundSupport özelliği tarafından üretilen yüksek ses basıncı seviyesinin bilincinde olun.

Tinnitus SoundSupport özelliğinin kullanım süresi sınırlamalarını uygulama yazılımında gösterildiği gibi not alın. Yazdırılan rapora ve İşitme cihazı Kullanım Kılavuzuna, her zaman maksimum günlük kullanım süresini girin.

Tinnitus SoundSupport, 18 yaşın altındaki hastalar için tasarlanmamıştır.

⚠ Uyarılar

İ Çok Güçlü Cihazlar

Güvenlik gereği, işitme cihazı kullanıcısının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan, maksimum ses basıncı kapasitesi 132 dB SPL'yi (IEC 711) aşabilen bir işitme cihazının seçimi, uygulanması ve kullanılması sırasında çok dikkatli olunmalıdır.

İ Ayaraları Aktar

Ayarlar aktarılırken, hastanız cihazları takmamalıdır.

İ In-situ Odyometre

In-Situ Odyometre, tanı amaçlı kullanılmamalıdır. In-Situ Odyometreyi gerçekleştirmeden önce, NOAH veya Genie 2'deki Hasta adımında bir odyogram girdiğinizden emin olun.

In-Situ Odyometreyi gerçekleştirmeden önce tüm REM Autofit sonuçlarını kaldırın.

In-situ Odyometre'yi sessiz bir ortamda gerçekleştirdiğinizden emin olun.

İ Tone Burst ABR

Lütfen ABR değerlerini eHL olarak girin, bu odyograma göre doğru kazançların belirlenmesini sağlar.

İ Feragatname

Üretici, bu yazılımın kullanım amacı veya uyarılar dışında kullanılmasıyla doğacak sonuçlar için sorumluluk kabul etmez.

Ürün simgelerinin tanımı

Genie ve Genie 2 kullanım kılavuzunda karşınıza çıkabilecek simgelerin tanımı aşağıdaki gibidir:

Simge	Açıklama
	Uyarılar Bu simge ile işaretlenen metin, ürün kullanılmadan önce okunmalıdır.
	Üretici Ürün, adı ve adresi simgenin yanında bulunan üretici tarafından üretilmiştir. AB Yönergesi 90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC'de belirtildiği üzere tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
	CE işareti Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC'ye uymaktadır. Dört haneli numara, onaylı kuruluşun kimlik bilgisini gösterir.
	Elektronik Atık (WEEE) İşitme cihazlarınızı, aksesuarlarınızı veya pillerini yerel regülasyonlara göre geri dönüştürün veya atılmaları için onları işitme uzmanınıza iade edin. Elektronik ekipman, atık ve elektriksel ekipman (WEEE) hakkındaki Yönerge 2012/19/EU tarafından kapsamaktadır.
	Elektronik kullanım kılavuzuna başvurun Kullanıcının elektronik kullanım kılavuzuna danışma gereksinimini belirtir.
	Kullanım kılavuzuna başvurun Kullanıcının, kullanım kılavuzuna danışma gereksinimini belirtir.



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Denmark
+45 3917 7100

CE 0543